

## RELATÓRIO TÉCNICO

### BIOART VD Equipo para Videolaparoscopia MS.: 80330630015

#### MARCA



#### FABRICANTE

**BIOTEC PROD HOSP LTDA**  
Av. Victor Odorico Bueno, 595 – Galpão C – Terra Preta – Mairiporã / SP CEP: 07600-000  
CNPJ: 07.204.591/0001-68 – IE: 433.097.131.111 MS: GY86613786X5 -  
PABX: (11) 4818-9000  
E-mail: [biotec@biotechospitalar.com.br](mailto:biotec@biotechospitalar.com.br)

#### **Composição:**

Extensão em PVC cristal e azul, isento de látex, atóxico, ponta introdutora/ perfurador com tampa, pinça corta – fluxo nas duas extensões, conector Escalonado (graduado) e Luer Lock.

#### **Indicação:**

É indicado para irrigação e aspiração de baixo fluxo, em procedimentos médicos de videolaparoscopia.

#### **Apresentação:**

Embalagem Primária: Papel grau cirúrgico, com 1 unidade.  
Embalagem Secundária: Caixa de Papelão, empilhamento máximo 12 caixas.

#### **Instrução de Uso:**

Abrir assepticamente a embalagem no momento do uso. Verificar se o CONECTOR é adequado ao procedimento.

Conectar a extensão na coloração azul e ponta introdutora ao frasco de soro.

Conectar a extensão na coloração cristal e ponta com conector graduado no aspirador.

Conectar a porção proximal da extensão na coloração azul e cristal com a ponta em conector graduado ou Luer Lock no instrumental do cirurgião.

O produto deve ser aplicado e supervisionado por um profissional da saúde, conhecedor das técnicas deste tipo de produto. Evite a aplicação de força excessiva durante a inserção do produto.

O produto é inserido de acordo com os procedimentos padronizados pela equipe médica. Verifique o estado da embalagem e do produto antes de utilizá-lo.

Verifique se o produto se encaixou adequadamente. Produto de Uso Único –

Destruir após o uso

### Precauções, restrições e advertências:


- Evite temperaturas elevadas;
- Proteger da luz e umidade;
- Abrir a embalagem somente no momento do uso;
- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, ou, seu prazo de validade/ esterilização esteja vencido.

### Imagens:

#### Extensão de Irrigação e aspiração – Bioart VD conector Graduado



#### Extensão de Irrigação e aspiração – Bioart VD conector Luer Lock

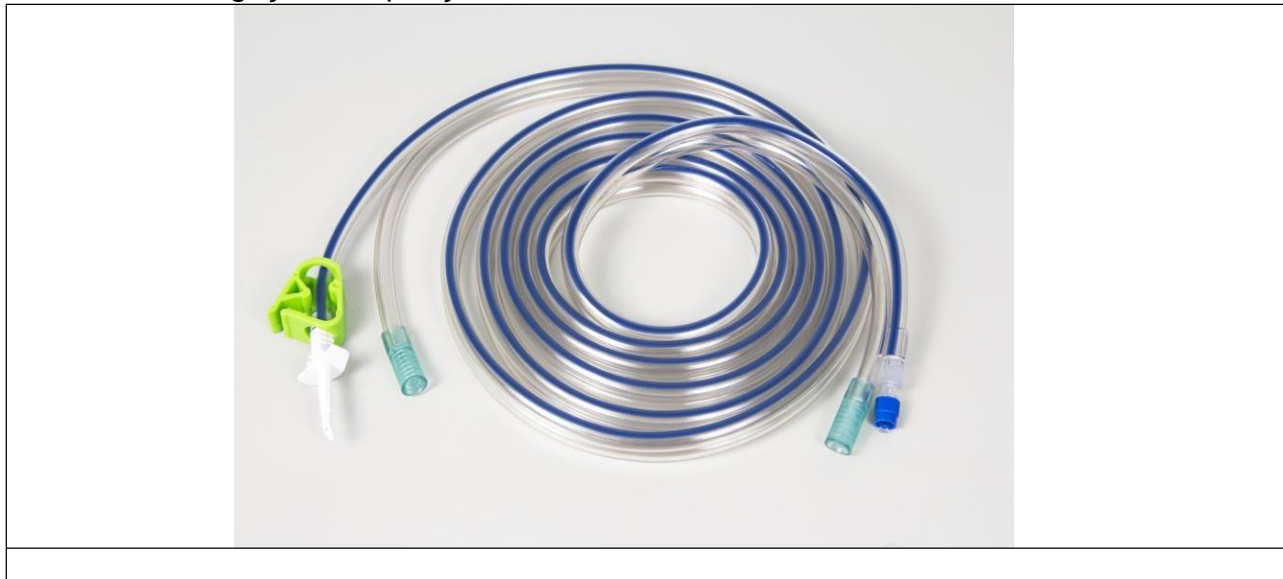

NOME	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BIOTEC
BIOART VD – CON. GRADUADO	Extensão em PVC cristal e azul, atóxico, ponta introdutora/perfurador com tampa, pinça corta – fluxo nas duas extensões, conector Escalonado (graduado). Comprimento 3 metros, diâmetro interno x externo 6 x 9mm.	00.15.008
BIOART VD – CON. LUER LOCK	Extensão em PVC cristal e azul, atóxico, ponta introdutora/perfurador com tampa, pinça corta – fluxo nas duas extensões, conector Luer Lock. Comprimento 3 metros, diâmetro interno x externo 6 x 9mm.	00.15.017

