

Biolevine

Sonda Gástrica Tubular FR 32

MS.: 803.306.390.03

MARCA



FABRICANTE

BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Av. Victor Odorico Bueno, 595 – Terra Preta –
Mairiporã/SP CEP: 07661-605
CNPJ: 07.204.591/0001-68 – IE: 433.097.131.111
MS: GY86613786X5 - PABX: (11) 4818-9000
E-mail: biotec@biotechospitalar.com.br

Composição:

Tubo em PVC cristal (dureza 65 shore A), isento de látex, orifícios laterais e intercalados com extremidade arredondada, atraumática e orifício central. Comprimento 80 cm, conector com obturador.

Indicação:

Lavagem Esofagogástrica, Cirurgia Bariátrica.

Apresentação:

Embalagem Primária: Papel grau cirúrgico, com 1 unidade.

Embalagem Secundária: Caixa de Papelão, empilhamento máximo 6 caixas.

Instrução de Uso:

- Abrir a embalagem, somente no momento do uso e após certificar-se que a mesma não foi violada;
- Havendo sinais de violação da embalagem não utilize o produto;
- Verifique o prazo de validade do produto e da esterilização estando vencidos não utilize o produto;
- Verifique se as medidas da sonda são adequadas de acordo com o diâmetro a ser utilizado;
- Após abertura, introduzir a sonda através da cavidade oral e direciona-la até o estomago ou porção gástrica desejada;
- Após o posicionamento da sonda utilize o obturador para vedação gástrica;
- Verifique se a sonda ficou devidamente posicionada.
- Após o uso do produto, descartá-lo em local apropriado.

Advertência:

- Evite temperaturas elevadas;
- Proteger da luz e umidade;
- Abrir a embalagem somente no momento do uso;
- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, ou, seu prazo de validade/esterilização esteja vencido.

REPROCESSAMENTO PROIBIDO.

DESCARTAR APÓS O USO.

PRODUTO ESTÉRIL.

Imagem:



| NOME | DESCRIÇÃO | CODIGO BIOTEC |
|-----------|--|---------------|
| BIOLEVINE | Sonda Gástrica, em PVC, tubular, diâmetro de 32FR, 3 orifícios laterais na extremidade, 80 cm de comprimento e conector com obturador. | 00.22.001 |