

RELATÓRIO TÉCNICO

BIOFLOOR Aspirador Cirúrgico MS.: Produto Isento

MARCA



FABRICANTE

BIOTEC PROD PLASTICOS E METÁLICOS LTDA EPP

Av. Victor Odorico Bueno, 595 – Galpão A/B –
Terra Preta – Mairiporã / SP CEP: 07600-000

CNPJ: 07.204.591/0001-68 – IE:

433.097.131.111

MS: GY86613786X5 - PABX: (11) 4818-9000

E-mail: biotec@biotechospitalar.com.br

Composição:

Disco rígido, tubo em PVC cristal e conector graduado.

Opcionais: comprimento da extensão.

Indicação:

Aspiração de líquidos no chão/piso do centro cirúrgico.

Apresentação:

Embalagem Primária: Saco Plástico, com 1 unidade.

Embalagem Secundária: Caixa de Papelão, empilhamento máximo 6 caixas.

Instrução de Uso:


- ✓ Verifique o estado da embalagem e do produto antes de utilizá-lo.
- ✓ Abrir a embalagem no momento do uso.
- ✓ Verificar se o tamanho da extensão esta adequado.
- ✓ Conectar a extensão ao ponto do aspirador.
- ✓ Posicionar o disco no local para manter a aspiração.
- ✓ Realizar aspiração de acordo com a rotina da unidade.

Advertência:

- Evite temperaturas elevadas;
- Proteger da luz e umidade;
- Abrir a embalagem somente no momento do uso;
- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, ou, seu prazo de validade/esterilização esteja vencido.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL.

Imagem:

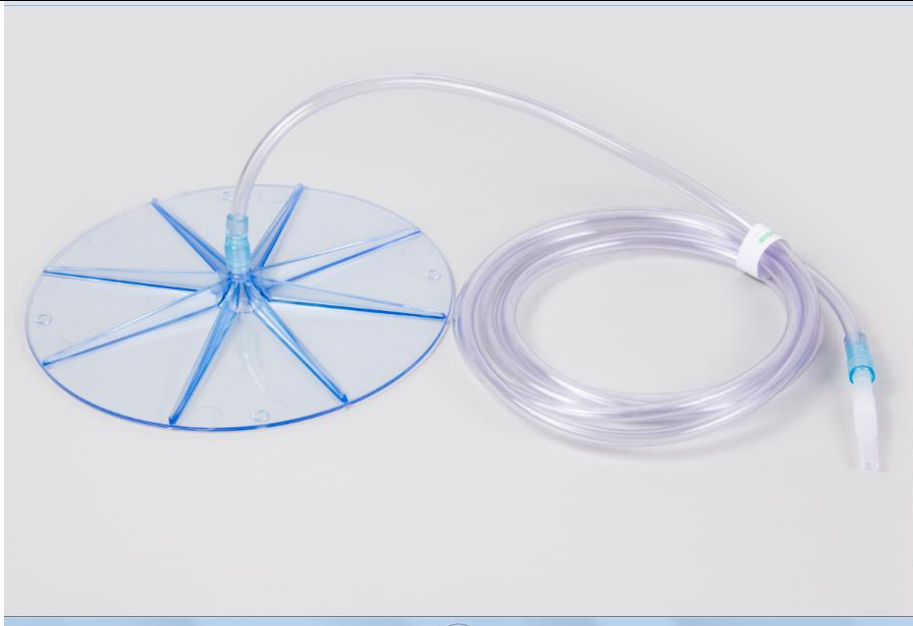

NOME	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BIOTEC
BIOFLOOR	Disco rígido com 22cm, tubo em PVC cristal de 3m e conector graduado e conector união.	00.03.005