



## **INSTRUÇÃO DE USO BIODRIM – CÔLETOR DE URINA**

Para correta utilização do produto, seguir as instruções abaixo:

- Verificar se a embalagem e o produto apresentam-se em condições de uso.
- Abrir embalagem somente no momento do uso, com as mãos devidamente higienizadas.
- Retirar o produto da embalagem.
- Retirar a tampa do conector, quando couber.
- Acoplar o conector na sonda instalada no paciente ou ao pênis do mesmo, quando couber.
- Pendurar o coletor no leito do paciente, quando couber.
- Descartar o produto após o uso.

### **CONTRAINDICAÇÕES:**

Este produto não apresenta contraindicações ou efeitos colaterais, entretanto recomenda-se o uso por enfermeiro, médico ou outro profissional especializado conhecedor das técnicas de manuseio deste.

### **ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:**

Produto não estéril. Não utilizar os produtos que apresentem sua embalagem danificada e/ou com prazo de validade vencido. Seguir as orientações do rótulo e instruções de uso.

### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:**

Manter o produto na embalagem original, protegida de luz solar, umidade, poeiras e temperaturas elevadas.

