



INSTRUÇÃO DE USO BIOQUIM – COLETOR DE PERFUROCORTANTE

Para correta utilização do produto, seguir as instruções abaixo:

- Encha o reservatório até a linha pontilhada.
- Não reencepe ou entorte as agulhas usadas.
- Mantenha distância do coletor do corpo.
- Os coletores devem ser recolhidos por veículos habilitados, pertencentes ao Serviço de Coleta de Resíduos da Saúde do município.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar os produtos que apresentarem suas embalagens danificadas e/ou prazo de validade do produto e da esterilização vencidos.

Qualquer irregularidade com o produto entrar em contato com o fabricante através do telefone: (11) 4818-9000.

Aconselhamos o uso do produto somente por enfermeiro(a), médico ou outro profissional especializado conhecedor das técnicas de manuseio deste tipo de produto

Descartar o produto após o uso.

Abrir a embalagem, somente no momento do uso.

Artigo médico hospitalar de uso único. Proibido Reprocessar

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PARA EVITAR ACIDENTES COM MATERIAIS INFECTANTES:

Não desconecte, reencepe ou entorte as agulhas usadas.

Todo material que perfura ou corta deve ser descartado no coletor.

Não jogue os materiais perfurocortantes/tóxico/quimioterápico no lixo comum.

Não exceda o limite de enchimento do coletor.

Para descarte do coletor lacre a tampa e transporte pelas alças, afastado do corpo.

Após o uso e fechamento, acondicione o coletor em saco plástico normatizado, conforme a norma NBR 9190.

CUIDADOS ESPECIAIS:

Considerar o produto potencialmente infectante após o uso, devendo ser manuseados com cuidado e descartados em recipientes adequados para não haver risco de contaminação acidental.

A incineração deve ser feita por empresas especializadas atendendo aos requisitos da **ANVISA** e às normas internacionais de gestão e preservação ambiental.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Durante o transporte e manuseio do produto, tomar todos os cuidados, para que não ocorra danificação do produto, bem como de sua embalagem.

Conservar o produto em local limpo, fresco e seco, à temperatura ambiente



**CONTRAINDICAÇÕES:**

Este produto não apresenta contraindicações e efeitos colaterais, entretanto recomenda-se o manuseio do produto seja realizado por enfermeiro (a), médico ou outro profissional especializado conhecedor das técnicas de manuseio deste tipo de produto.

EFEITOS ADVERSOS:

Não foram constatados efeitos adversos com o uso dos produtos.

