

## INSTRUÇÃO DE USO BIOVAR (ESTÉRIL) – COLETOR DE SECREÇÃO

Para correta utilização dos produtos, seguir as instruções abaixo:

- Abrir a embalagem, somente no momento do uso e após certificar-se que o produto é adequado para o uso.
- Certifique-se de que a válvula de controle de aspiração está funcionando, exercendo uma leve pressão com o dedo indicador. O êmbolo deve estar se movendo livremente. (Quando aplicável)
- Não obstrua a entrada da válvula (quando aplicável)
- **OBS.:** O objetivo da válvula é impedir que um excesso na pressão danifique o frasco ou bolsa e altere a aspiração.
- Antes de conectar a extensão ao vácuo, coloque o frasco ou bolsa na posição VERTICAL colocando-o no suporte de piso, ou pendurando-o pela alça. A válvula antirrefluxo funciona como boia e caso não haja sucção, desconecte o tubo de vácuo assegure-se que o embolo da válvula esteja em baixo e de início ao processo novamente.
- Conecte as extensões vácuo e aspirador de cavidade/piso ou sonda.
- Ao notar que o reservatório atingiu o nível máximo de enchimento, substitua por outro coletor.
- No caso do paciente não mais necessitar do coletor, retirar e descartar.
- Estéril
- Uso único
- Reprocessamento proibido

### PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar os produtos que apresentarem suas embalagens danificadas e/ou prazo de validade do produto e da esterilização vencidos.

Qualquer irregularidade com o produto entrar em contato com o fabricante através do telefone: (11) 4818-9000.

Aconselhamos o uso do produto somente por enfermeiro (a), médico ou outro profissional especializado conhecedor das técnicas de manuseio deste tipo de produto

Descartar o produto após o uso.


Abrir a embalagem, somente no momento do uso e após certificar-se de que o produto é adequado ao paciente.

**Artigo médico hospitalar de uso único. Não reutilizar**

### CUIDADOS ESPECIAIS:

Considerar o produto potencialmente infectante após o uso, devendo ser manuseados com cuidado e descartados em recipientes adequados para não haver risco de contaminação acidental.



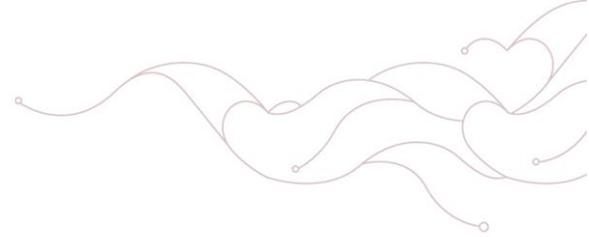

A incineração deve ser feita por empresas especializadas atendendo aos requisitos da **ANVISA** e às normas internacionais de gestão e preservação ambiental.

**ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

Durante o transporte e manuseio do produto, tomar todos os cuidados, para que não ocorra danificação do produto, bem como de sua embalagem.

Conservar o produto em local limpo, fresco e seco, à temperatura ambiente

**CONTRAINDICAÇÕES:**

Este produto não apresenta contraindicações e efeitos colaterais, entretanto recomenda-se o manuseio do produto seja realizado por enfermeiro(a), médico ou outro profissional especializado conhecedor das técnicas de manuseio deste tipo de produto.

**EFEITOS ADVERSOS**

Não foram constatados efeitos adversos com o uso dos produtos.

