



INSTRUÇÃO DE USO BIOECOPISS – COLETOR DE URINA

Para correta utilização do produto, seguir as instruções abaixo:

- Lave as mãos em água corrente e finalize a assepsia com álcool 70%;
- Coloque luvas (importante para evitar infecções)
- Certifique-se que a embalagem do produto não foi violada e que o produto apresenta-se em condições de uso. Qualquer irregularidade com o produto entrar em contato com o fabricante através do telefone: (11) 4818-9000.
- Abra a embalagem, somente no momento do uso e próximo à pessoa que irá utilizá-lo;
- Introduza o órgão masculino, cuidadosamente, no bioecopiss; e caso aplicável, adeque a posição de acordo com as necessidades do usuário;
- Retire cuidadosamente o bioecopiss; e descarte o conteúdo coletado em local adequado;
- Faça a higienização do bioecopiss (lavagem em água corrente e assepsia com álcool 70%);
- Retire as luvas;
- Lave as mãos

CONTRAINDICAÇÕES:

Este produto não apresenta contraindicações ou efeitos colaterais, entretanto recomenda-se o uso por enfermeiro, médico ou outro profissional especializado conhecedor das técnicas de manuseio deste.

ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

Produto não estéril. Não utilizar os produtos que apresentem sua embalagem danificada e/ou com prazo de validade vencido. Seguir as orientações do rótulo e instruções de uso.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

Manter o produto na embalagem original, protegida de luz solar, umidade, poeiras e temperaturas elevadas.

