

## INSTRUÇÃO DE USO

Para correta utilização do produto, seguir as instruções abaixo:

- Abrir assepticamente a embalagem no momento do uso.
- Verificar se o tamanho da extensão está adequado (quando aplicável).
- Conectar a extensão ao aspirador e ao ponto de vácuo (quando aplicável).
- O produto deve ser aplicado e supervisionado por um profissional da saúde, conhecedor das técnicas deste tipo de produto. Este procedimento requer que se realize uma análise profunda da necessidade de aplicação deste tipo de produto, devendo ser monitorado pelo profissional durante a aplicação e o tempo que dure o tratamento do paciente.
- Evite força excessiva durante a conexão do produto com a rede.
- Verifique o estado da embalagem e do produto antes de utilizá-lo.
- Verifique se o produto se encaixou adequadamente.
- Utilize o furo central da cânula (aspirador) para controle de fluxo (quando aplicável).
- Não reutilize a extensão (quando aplicável).
- Produto de Uso Único – Destruir após o uso.

### PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar os produtos que apresentarem suas embalagens danificadas e/ou prazo de validade do produto e da esterilização vencidos.

Qualquer irregularidade com o produto entrar em contato com o fabricante através do telefone: (11) 4818-9000.

Aconselhamos o uso do produto somente por enfermeiro (a), médico ou outro profissional especializado conhecedor das técnicas de manuseio deste tipo de produto

Descartar o produto após o uso.

Abrir a embalagem, somente no momento do uso e após certificar-se de que o produto é adequado ao paciente.

### Artigo médico hospitalar de uso único. Não reutilizar

### CUIDADOS ESPECIAIS:

Considerar o produto potencialmente infectante após o uso, devendo ser manuseados com cuidado e descartados em recipientes adequados para não haver risco de contaminação acidental.


A incineração deve ser feita por empresas especializadas atendendo aos requisitos da **ANVISA** e às normas internacionais de gestão e preservação ambiental.

### ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Durante o transporte e manuseio do produto, tomar todos os cuidados, para que não ocorra danificação do produto, bem como de sua embalagem.

Conservar o produto em local limpo, fresco e seco, à temperatura ambiente

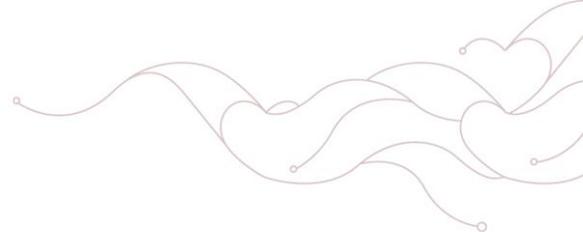

**CONTRAINDICAÇÕES:**

Este produto não apresenta contraindicações e efeitos colaterais, entretanto recomenda-se o manuseio do produto seja realizado por enfermeiro (a), médico ou outro profissional especializado conhecedor das técnicas de manuseio deste tipo de produto.

**EFEITOS ADVERSOS**

Não foram constatados efeitos adversos com o uso dos produtos.

