

INSTRUÇÃO DE USO**1. NOME DO PRODUTO: BIOGERADOR**

Notificação Anvisa: 80330630045

2. INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE

O **BIOGERADOR** de vácuo serve para gerar vácuo através do ponto de ar comprimido hospitalar.

Sua Ação é transformar a pressão positiva em pressão negativa pelo sistema *ventur*.

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalagem secundária - Caixa de papelão

4. INSTRUÇÕES DE USO:

Abra cuidadosamente a embalagem;

Verifique o produto antes de instalá-lo, o mesmo deve apresentar-se em perfeitas condições de uso (sem rachaduras ou danificações);

Qualquer irregularidade com o produto entre em contato com o fabricante através do telefone 11 4818-9000.

Estabeleça um local na parede, com superfície lisa e limpa, para instalação do Biogerador;

Retire o *liner* dupla face e pressione o equipamento na parede para adesão completa;

Certifique-se que o Biogerador se acoplou corretamente;

Conecte a CONEXÃO TOMADA DE AR HOSPITALAR – BIOGERADOR na rede de ar comprimido da instituição;

Conecte a via vácuo do coletor de secreção no ENGATE PADRÃO HOSPITALAR – BIOGERADOR.

FABRICADO POR: BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Avenida Victor Odorico Bueno, 595 – F/G – Bairro Terra Preta – CEP. 07661-605 – Mairiporã/SP

CNPJ (MF).07.204.591/0001-68 – INSC. EST. 433.097.131.111

TEL.: (11)4818-9000 – E-mail: biotec@biotechospitalar.com.br

AUT. FUNC. ANVISA/MS nº GY86613786X5