

INSTRUÇÃO DE USO

1. NOME DO PRODUTO: BIOGERADOR

Notificação Anvisa: 80330630045

2. INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE

O **BIOGERADOR** de vácuo serve para gerar vácuo através do ponto de ar comprimido hospitalar. Sua Ação é transformar a pressão positiva em pressão negativa pelo sistema venturi.

3. INSTRUÇÕES DE USO:

Para Instalação:

- 1- Abra cuidadosamente a embalagem;
- 2- Verifique o produto antes de instalá-lo, o mesmo deve apresentar-se em perfeitas condições de uso (sem rachaduras ou danificações);
- 3- Estabeleça um local na parede, com superfície lisa e limpa, para instalação do Biogerador;
- 4- Retire o *liner* da dupla face e pressione o equipamento na parede para adesão completa;
- 5- Certifique-se que o Biogerador fixou corretamente;
- 6- Conecte a extensão azul na conexão lateral do Biogerador, introduzindo firmemente até travar, certifique-se o acoplamento adequado;
- 7- Conecte a extensão azul no fluxômetro do ar comprimido na régua de gases;

Para o Uso:

- 1- Ligue o ar comprimido (fluxômetro);
- 2- **CONFIRME O FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE VÁCUO A CADA USO**, verifique se na saída universal do pino escalonado na parte superior do Biogerador está gerando vácuo;
- 3- Conecte a via vácuo do coletor de secreção na saída universal do pino escalonado, na parte superior do Biogerador. Utilizar somente frascos coletores que **POSSUAM VÁLVULA ANTIRREFLUXO**;
- 4- Após o uso realizar a purga/ drenagem do filtro de ar, **PUXANDO O CONECTOR INFERIOR PARA BAIXO**;

Ao notar qualquer irregularidade com o produto **NÃO UTILIZAR O MESMO**. Entre em contato imediatamente com o fabricante através do telefone (11) 4818-9000.

4. PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

Assegure que o produto/embalagem se encontra em condições de uso.

Não utilizar o produto que apresente embalagem danificada, violada e/ou prazo de validade expirado.

Recomenda-se que o manuseio do produto seja realizado somente por enfermeiro, médico ou outro profissional especializado conhecedor das técnicas de manuseio deste tipo de produto.

A BIOTEC não se responsabiliza por danos por inexperiência ou utilização imprópria. O usuário é responsável pelo uso inadequado ou diferente do recomendado.

CUIDADOS ESPECIAIS: **CONFIRME O FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE VÁCUO A CADA USO.**

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Durante o transporte e manuseio do produto, tomar todos os cuidados, para que não ocorra danificação do produto, bem como de sua embalagem.

Conservar o produto em local limpo, fresco e seco, à temperatura ambiente

CONTRA INDICAÇÕES:

Este produto não apresenta contra-indicações e efeitos colaterais, entretanto recomenda-se o manuseio do produto seja realizado por enfermeiro (a), médico ou outro profissional especializado conhecedor das técnicas de manuseio deste tipo de produto.

ESTERILIZAÇÃO: Produto não estéril.

VALIDADE: 5 (cinco) anos a partir da data de fabricação.

FABRICADO POR:

BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Avenida Víctor Odorico Bueno, 595 – F/G/H – Bairro Terra Prete

Mairiporã/SP - CEP: 07661-605

TEL.: (11)4818-9000 – e-mail:biotec@biotechospitalar.com.br

Resp. Técnico: Muriel de Miranda Martinho - Crefito-3:193185-F