

BIOFILTER

Filtro HMEF
MS: 803.306.390.06

MARCA



FABRICANTE

Biotec Produtos Hospitalares LTDA
Av. Victor Odorico Bueno, 595 - Terra Preta –
Mairiporã - SP CEP: 7661-605
CNPJ: 07.204.591/0001-68 – IE: 433.097.131.111
MS: GY86613786X5 - PABX: (11) 4818-9000
E-mail: biotec@biotechospitalar.com.br

Composição:

O filtro HMEF é composto por capsula de plástico rígido, contendo no interior um disco HMEF, tendo como característica principal a retenção da umidade do ar inspirado pelo paciente adequando o processo de ventilação, com eficiência de filtração bacteriana e viral de 99,999%, isento de látex.

Indicação:

O BIOFILTER HMEF, é indicado para ser utilizado em circuitos respiratórios em pacientes submetidos a ventilação mecânica para reduzir o risco de contaminação cruzada e ou reinfecção.

Volume corrente: 150ml a 1500ml

Espaço morto: 55ml

Eficiência de filtragem bacteriana de 99,99% / viral 99,99%)

Trocar a cada 48 horas.

Apresentação:

Embalagem Primária: Papel grau cirúrgico.

Embalagem Secundária: Caixa de Papelão, empilhamento máximo 9 caixas.

Processo realizado em Óxido de Etileno

Instrução de Uso:

1. Abrir a embalagem contendo o BIOFILTER HMEF evitando tocá-los internamente;
2. Conectar o tubo de ligação do Filtro através de suas conexões, e este conjunto ao circuito respiratório;
3. As conexões com o circuito respiratório devem ser efetuadas de forma a deixá-las bem firme, evitando assim possíveis fugas e ar e/ou gases;
4. Verificar se há algum vazamento pelo sistema conectado. Caso haja vazamento, substitua imediatamente o dispositivo;
5. Verificar periodicamente o aumento da resistência ao fluxo e, caso seja necessário, substituir o dispositivo;
6. Se a conexão de monitoramento dos gases não for utilizada, verificar que a mesma esteja devidamente fechada.
7. Tempo máximo de utilização do BIOFILTRO HMEF: 48 horas (adulto)
8. Caso haja sujidade antes do tempo máximo de uso, deverá ser trocado e instalado um novo sistema de filtragem.
9. Produto de Uso Único – Descartar após o uso

Precauções, restrições e advertências:

- Não associar a utilização do HMEF com nebulizadores ou humidificadores;
- Não adicione umidades aos dispositivos;
- Abrir a embalagem somente no momento do uso;
- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, ou, seu prazo de validade/esterilização esteja vencido.

Imagens:



NOME	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BIOTEC
BIOFILTER HMEF	Possuí característica eletrostática, hidrofóbica, age de maneira semelhante as vias respiratórias superiores humanas, retendo a umidade e o calor presente no ar expirado. Barreia contra vírus e bactérias que possui eficiência de 99,999%	00.36.011