



BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

INSTRUÇÃO DE USO

INDICAÇÕES:

O ASPIRADOR DE DISCO é indicado, para aspiração de líquidos e sólidos no chão do centro cirúrgico, substituindo os panos para secagem do piso.

Para correta utilização do produto, seguir as instruções abaixo:

- Abrir assepticamente a embalagem no momento do uso.
- Verificar se o tamanho da extensão está adequado. (Quando Aplicável)
- Conectar a extensão ao ponto de vácuo. (Quando Aplicável)
- Evite força excessiva durante a conexão do produto com a rede.
- Verifique o estado da embalagem e do produto antes de utilizá-lo.
- Verifique se o produto se encaixou adequadamente.
- Não reutilize a extensão. (Quando Aplicável)
- Produto de Uso Único – Destruir após o uso.
- Utilize o furo central da cânula (aspirador) para controle de fluxo. (Quando Aplicável)